


일 시 : 2022년 04월 04일
 수 신 : 병(의)원의 진단검사의학과 실장님
 발 신 : (주)바이오시스템즈 한국지사 고객지원부
 제 목 : 17-KETOSTEROIDS(COD. 11002) 구성품 변경 안내

- 항상 저희 (주)바이오시스템즈의 제품을 사용해주시는 각 병(의)원 실장님들께 감사의 말씀을 드립니다.
- 자사 제품 17-KETOSTEROIDS (≥Lot.45530) 구성품 중 Microcolumns 의 Filter 변경으로 인하여 **Calculation factor 가 26.7mg/L (92.5µmol/L)로 변경되었습니다.** ★Calculation factor는 최종 농도 계산에 사용되는 계수임으로 아래의 내용을 확인하시어 임상 검사에 참고하시기 바랍니다.

17-KETOSTEROIDS	변경 전	변경 후
Recovery factor	0.88	0.75
Calculation factor	22.7 (mg/L) 8.9 (µmol/L)	26.7 (mg/L) 92.5 (µmol/L)
Chromatographic Separation times	40 min	25 min

- 변경되는 17-KETOSTEROIDS 시약 Box 외관 '!주의' 안내 스티커가 부착되어 출고 되오니, 참고 부탁드립니다.

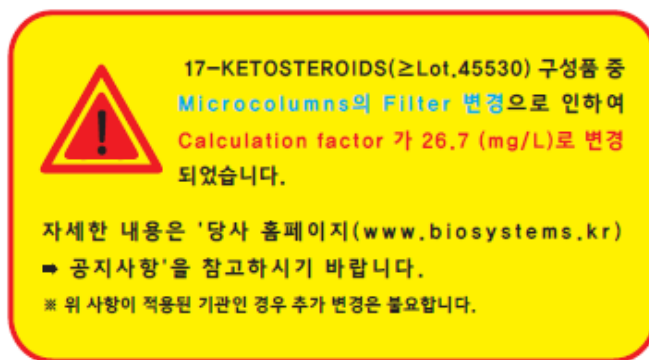

- 본 안내 내용과 관련하여 추가 궁금하신 사항은 고객지원부(031-790-1956, 1942)으로 연락 부탁드립니다.

(주)바이오시스템즈 한국지사
 고객지원부